




... co upřednostňují uživatelé?

Zlatá medaile za bezpečný produkt pro použití v medicíně. Goldene SMM 98.

1 OCHRANNÝ DESIGN KONTEJNERU


- Systém dvojitého víka s těsněním

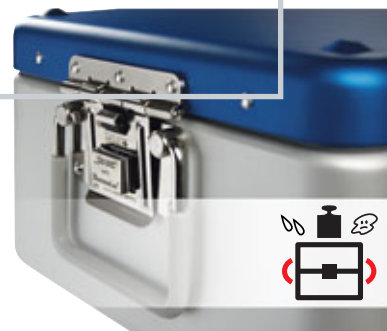

- Nejbezpečnější kontejner splňuje EN 868-8


2 TLAKOVÝ VENTIL

- Opakovaně použitelná antibakteriální bariéra
- Žádné provozní náklady
- Snadná kontrola před sterilizací

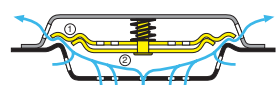

3 ODVADEČ KONDENZÁTU PRO TĚŽKÁ SÍTA

- Exkluzivně u kontejnerů Wagner

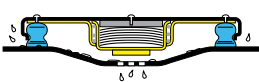

4 UZÁVĚR THERMOLOC®

- Automatické zaplombování
- Žádné provozní náklady



- Minimální provozní náklady



Steriset®

Systém Steriset® je výsledkem 60 let obchodní zkušenosti a důsledného zpracování požadavků a podnětů z klinické praxe.

Systém umožňuje udržet jakýkoli materiál sterilní v nejvyšší dosažitelné kvalitě a v souladu s ostatními moderními požadavky jako jsou bezpečnost, hospodárnost, životní prostředí a splňuje evropskou normu EN 868-8 – kontejner je považován za otevřený, když víko a spodní část sterilizační nádoby jsou od sebe tak daleko odděleny, že uzavírací mechanismus mezi nimi nezaručuje jejich pevné spojení (těsnost).

Kontejnery Steriset® jsou nabízeny ve dvou základních provedeních – s filtry nebo s ventily. Obě varianty umožňují stejné kvalitní sterilizaci a následné udržení sterility. Liší se uživatelským komfortem a ekonomikou provozu.

- KVALITA = 100 % NAPLNĚNÍ VAŠICH OČEKÁVÁNÍ.

Toto úsilí bylo oceněno zlatou medailí za bezpečný produkt pro použití v medicíně na soutěži Goldene SMM98.


Systém Steriset® firmy Wagner je registrován a certifikován v České republice a více než 7 let slouží ke spokojenosti mnoha uživatelů.



Tlakový ventil


Tlakový ventil z nerezové oceli tvoří nepropustnou bariéru proti vniknutí mikrobiologických částic. Odpadá nutnost měnit filtry (filtr není filtr, je to bariéra!), čímž se kromě času ušetří náklady na provoz.

Funkce ventilu:

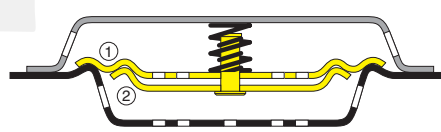


Fáze uklidová:

Uvnitř i vně kontejneru je stejný (atmosferický) tlak, tedy stejný tlak na obě platiny = platiny uzavřeny.

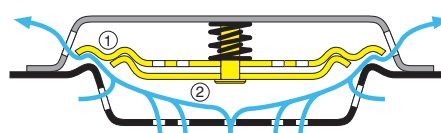

Fáze vakuová:

Klesá tlak vně kontejneru, vzniká rozdíl tlaku, který překonává odpor pružin a sterilizační medium (vzduch, vodní pára) proudí ven až do vyrovnání podtlaku.

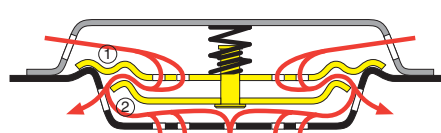

Fáze sterilizační - přetlaková:


Zvyšuje se tlak vně kontejneru, membrána č. 1 uzavřena a membrána č. 2 otevřena až do vyrovnání tlaku.

Víte, že všechny kontejnery jsou ventilové?


Ventil pro odvedení kondenzátu

Pro případ, kdy zatížení kontejneru je větší než 10 kg (vzniká zbytkový kondenzát) nebo při nepříznivých sterilizačních podmínkách (např. nevhodný tlak páry, staré sterilizátory, špatné skladování), se doporučuje místo standardního provedení s uzavřenou vanou používat kontejner s odvodem kondenzátu.


Jedná se o kontejner s termicky řízeným ventilem umístěným v nejnižším místě vany kontejneru.

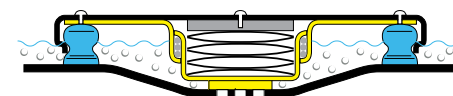

Fáze klidová: ventil uzavřen.

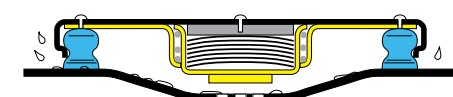

Fáze sterilizace: ventil otevřen.

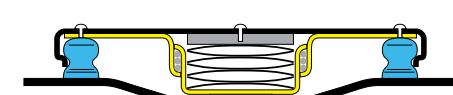

Fáze sušení: ventil uzavřen.

Uzávěr ThermoLoc®


Dokonalé zajištění sterility nastane jen tehdy, je-li sterilizační nádoba bezpečně zajištěna proti náhodnému otevření.

Od roku 1995 platí pro lékařské produkty zákon vyžadující odpovídající opatření k zamezení nežádoucího otevření sterilizační nádoby.

Toto opatření je výrobcem praktikováno buď použitím plomb na jedno použití, nebo plombovacím kartami - štítky (instalují se před sterilizací a otevřením nádoby se pak znehodnotí).

Kontejner SteriSet® s uzávěrem ThermoLoc® řeší tento problém elegantněji. Kontejner se „zaplombuje“ sám během sterilizace. Barevně označená pojistka se působením teploty během sterilizace sama zasune do příslušného uzavíracího otvoru (viz obr.) a kontejner tak bezpečně uzamkne. Po vychladnutí nádoby ji lze otevřít pouhým odpečetěním (posune se nahoru) a kontejner je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Výhody systému ThermoLoc® oceníte již po prvním otevření. Odpadá nepraktické plombování, čímž se šetří čas, náklady, a navíc nevznikají žádné odpady.

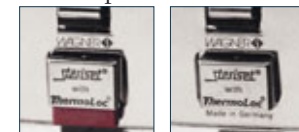


zaplombovaný uzávěr nezaplombovaný uzávěr

- POUŽITÍ KONTEJNERŮ STERISSET® S UZÁVĚREM THERMOLOC® JE MODERNÍ, EKONOMICKÉ A ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!



malé síto s přepážkami

velké síto s přepážkami

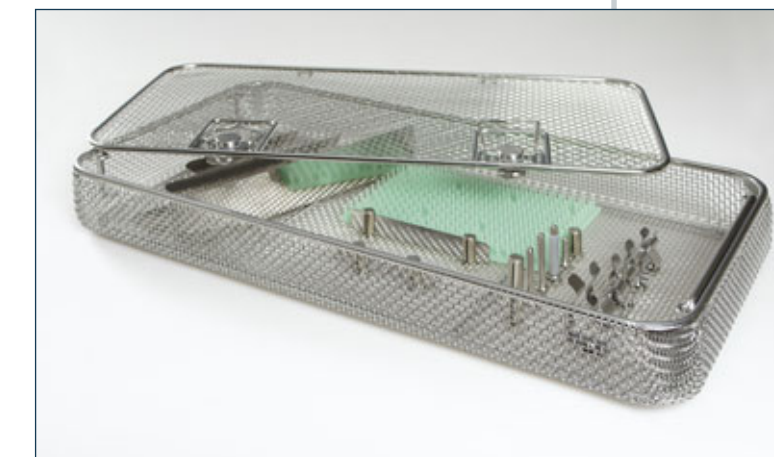

PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU Steriset



víko (celá sestava)

pojízdné regály pro uskladnění kontejnerů (různá provedení)

